

неноTM

bella



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



неноTM

bella

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Шановний Клієнте,

пристрій Neno Bella, який ви придбали, - це електричний молоковідсмоктувач, який слід використовувати для зціджування молока після пологів.


Перед використанням приладу зверніться до посібника користувача.

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Не використовуйте молоковідсмоктувач під час вагітності - це може призвести до передчасних пологів.
2. Не використовуйте пристрій, якщо ви страждаєте хронічними захворюваннями або гіперчутливістю, яка може викликати біль під час використання молоковідсмоктувача.
3. Перед кожним використанням пристрою переконайтесь, що жоден з його елементів не пошкоджений. Не використовуйте молоковідсмоктувач, якщо будь-яка його частина помітно пошкоджена.
4. Тримайте пристрій подалі від дітей та домашніх тварин.
5. З міркувань гігієни застосовувати молоковідсмоктувач повинна лише одна людина.
6. Тримайте насосну частину пристрою подалі від води.
7. Не піддавайте пристрій механічним пошкодженням, таким як падіння.
8. Тримайте силіконові частини молоковідсмоктувача подалі від гарячих поверхонь, щоб уникнути спотворень.
9. Кожного разу, коли ви маєте намір зберігати зціджене молоко, спочатку прочистіть та продезінфікуйте молоковідсмоктувач.
10. Не чистіть деталі приладу абразивними засобами.
11. Не намагайтеся самостійно ремонтувати молоковідсмоктувач - це призведе до втрати гарантії.
12. Якщо використання пристрою викликає біль або сильний дискомфорт, вимкніть його та віддаліть молоковідсмоктувач із грудей.
13. Трубка не вимагає частого миття. Переконайтесь, що трубка суха перед кожним використанням. Мокра трубка може пошкодити пристрій.
14. Не підключайте зарядний пристрій до напруги, вищої, ніж зазначено в специфікації.

2. ЕЛЕМЕНТИ

- A. Кришка
- B. Лійка
- C. Кришка мембрани
- D. Мембрана
- E. Муфта
- F. Клапан x2
- G. Пляшка для молока
- H. Підставка для пляшки
- I. Трубка
- J. Кабель для зарядки пристрою
- K. Насосний пристрій
- L. Соска для пляшки

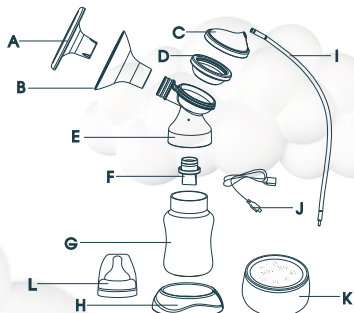

3. ОПИС РЕЖИМІВ


Режим зціджування :

L1 - 18,9 kPa; L2 - 21,5 kPa; L3 - 24,5 kPa; L4 - 30,7 kPa; L5 - 33,8 kPa; L6 - 36,9 kPa;
L7 - 38,9 kPa; L8 - 40,9 kPa; L9 - 42,9 kPa;

Режим стимуляції:

L1 - 3,9 kPa; L2 - 9,7 kPa; L3 - 12,8 kPa; L4 - 17,4 kPa; L5 - 20,5 kPa;
L6 швидкий - 12,8 kPa; L6 повільний - 38,9 kPa;

4. ОПИС ЗНАЧКІВ І КНОПОК

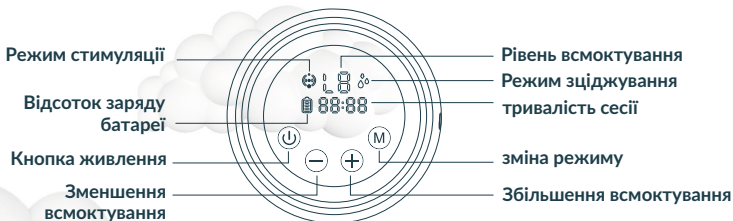

1. Кнопка живлення: Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

2. Зміна режиму: Для зміни режимів натисніть кнопку. Пристрій автоматично переключиться з режиму стимуляції в режим зціджування через 2 хвилини. Крім того, молоковідсмоктувач зберігає попередні налаштування і оснащений таймером. Після вклучення пристрою з'являться останні використані налаштування. Пристрій автоматично вимкнеться по 30 хвилинах використання.

3. Потужність всмоктування: Щоб збільшити потужність всмоктування, натисніть кнопку + на панелі; щоб зменшити потужність всмоктування, натисніть кнопку-на панелі (режим стимуляції: L1-L6; Режим зціджування: L1-L9)

4. Стан батареї: Вказує залишок заряду батареї. Зарядіть молоковідсмоктувач, якщо батарея розряджена.

5. Тривалість сесії : Вказує час роботи насоса. Пристрій автоматично вимкнеться через 30 хвилин.

5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ



6. ОЧИЩЕННЯ

Миття та дезінфекція - це дві різні обов'язкові функції. Вони повинні бути зроблені окремо, щоб захистити Вашу дитину і забезпечити правильну роботу молоковідсмоктувача.

Очищення - очищення поверхні і позбавлення від плям і бруду

Дезінфекція - знищення таких організмів, як бактерії та віруси, які можуть бути присутніми на поверхні пристрою

	Лійка	Компоненти молоковідсмоктувача (муфта, мембрана, кришка мембрани)	Пляшечка і соска
Перед першим в икористанням	Миття і дезінфекція	Миття і дезінфекція	Миття і дезінфекція
Після кожного використання	Миття	Миття	Миття
Раз на день	Дезінфекція	Дезінфекція	Дезінфекція

7. ЗБІР МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧА

1. Ретельно вимийте руки водою з милом, перш ніж торкатися молоковідсмоктувача та грудей.
2. Підключіть мембрану та насосний пристрій до муфти.
3. Приєднайте лійку до муфти.
4. Помістіть клапан у муфту.
5. Прикрутіть пляшку до муфти, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору.


Порада:

1. Перед кожним використанням перевіряйте, чи не пошкоджені частини молоковідсмоктувача. У разі необхідності замінити пошкоджені елементи новими
2. Завжди перевіряйте чистоту частин пристрою перед використанням.
3. Щоб уникнути пошкодження молоковідсмоктувача, переконайтесь, що всі його частини сухі перед початком використання

8. ПІДЗАРЯДЖЕННЯ МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧА

Перед першим використанням необхідно зарядити молоковідсмоктувач до повної зарядки протягом 2х годин, підключивши його до джерела живлення за допомогою USB кабелю. Піктограма акумулятора на дисплеї буде повною, коли зарядка завершиться

9. ВИКОРИСТАННЯ МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧА

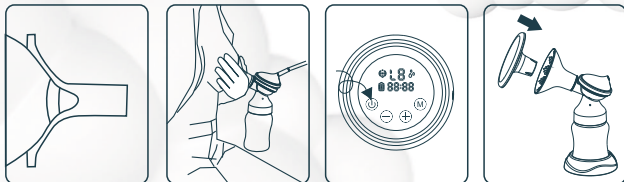

1. Покладіть лійку на груди , слідкуючи , щоб сосок потрапив в всередину дренажного каналу.
2. Великим і вказівним пальцями притисніть лійку та з'єднання молоковідсмоктувача до грудей. Підтримуйте груди рукою.
3. Увімкніть молоковідсмоктувач, натискаючи кнопку живлення, і виберіть режим роботи, який вам підходить.
4. Натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути молоковідсмоктувач після використання та встановіть кришку на лійку, щоб захистити пристрій від пилу
 - a. Молоковідсмоктувач починає працювати в режимі стимуляції. Встановіть зручний для вас рівень всмоктування за допомогою кнопки +/-**Режим стимуляції** - швидка підкачка, що імітує природне висмоктування молока з грудей дитиною, стимулюючи потік молока.
 - b. Через 2 хвилини молоковідсмоктувач автоматично переходить у режим зціджування. Відрегулюйте рівень всмоктування за допомогою кнопок +/-, знайдіть найвищий рівень всмоктування, який вам зручний.Якщо молоко починає витікати з грудей раніше, ніж пройде 2 хв, натисніть кнопку Змінити режим, щоб переключитися на режим зціджування молока.**Режим зцідження** - Повільніше всмоктування, м'яко та ефективно витягує молоко з грудей.
 - c. При використанні режиму зціджування, збільшуйте потужність всмоктування до тих пір, поки не відчуєте легкий дискомфорт (не біль), і далі необхідно зменшити силу всмоктування на одну ступінь.

10. FAQ

1. **Пристрій не запускається:** Переконайтеся, що молоковідсмоктувач підключений до робочої розетки. Якщо молоковідсмоктувач немає джерела живлення, його дисплей не увімкнеться і не з'явиться повідомлення про помилку.
2. **Відсутність / погане всмоктування:** Переконайтесь, що всі частини молоковідсмоктувача розташовані правильно. Переконайтеся, що всі компоненти молоковідсмоктувача розташовані правильно. Розібравши молоковідсмоктувач на частини, переконайтеся, що всі компоненти чисті і неушкоджені. Зберіть молоковідсмоктувач знову, відповідно до інструкцій, наведеної в розділі "Збір молоковідсмоктувача".
3. **З грудей потекло більше молока, ніж може вмістити пляшка:** вимкніть молоковідсмоктувач і від'єднайте його від живлення. Протріть молоковідсмоктувач вологою (не мокрою) тканиною. Коли всі компоненти пристрою висохнуть, складіть пристрій знову

11. ДОВГОСТРОКОВЕ ЗБЕРІГАННЯ

Пристрій оснащений батареєю і автоматично переходить в режим зберігання, коли воно не використовується протягом тривалого часу. Щоб відключити режим зберігання пристрою, підключіть його до електромережі не менше ніж на 2 години і повністю зарядіть акумулятор. Перш ніж відкласти молоковідсмоктувач на більш тривалий період часу, переконайтеся, що:

- a. всі компоненти молоковідсмоктувача чисті.
- b. насосний пристрій чистий.
- c. акумулятор пристрою повністю заряджений.

12. ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ

Приготуйте: м'яке мило або миючу рідину, чистий рушник для посуду, питну воду.

Частини, що підлягають миттю та дезінфекції:

- лійка,
- пляшка для молока,
- муфта,
- клапан,
- кришка мембрани,
- мембрана,
- кришка лійки.

ПРИМІТКА:

- Вимийте окремо всі частини, які мали прямий контакт з молоком після використання. Завдяки цьому ви уникнете утворення осаду та розмноження бактерій у пристрої.
- Для очищення приладу використовуйте лише питну воду (водопровідну або пляшкову).
- Під час чищення клапанів не використовуйте дрібні інструменти, такі як щітки. Будьте обережні, щоб не пробити клапан наскрізь.
- Розберіть, помийте та промийте всі деталі приладу, які безпосередньо контактували з молоком (крім насосного пристрою).

1. Очищення компонентів молоковідсмоктувача:



Крок 1 - промийте всі частини, від'єднані один від одного, (які стикалися з грудьми і молоком) в холодній воді, щоб змити залишки молока і осад, що утворився.

Крок 2 - Замочіть у теплій мильній воді протягом 5 хвилин, потім промийте.

Крок 3 - Дайте елементам висохнути природним шляхом. Зберігайте сухі частини пристрою в сухому прохолодному місці, коли він не використовується

2. Стерилізація компонентів молоковідсмоктувача (до першого використання і після використання):



Крок 1 - Заповніть каструлю такою кількістю води, щоб покрити всі частини розкладеного пристрій. Доведіть воду до кипіння, перш ніж покласти розібраний молокоотсос всередину.

Крок 2 - Помістіть частини пристрою в киплячу воду на 10 хвилин.

Крок 3 - Дайте компонентам пристрою висохнути природним шляхом. Зберігати сухі деталі у прохолодному і сухому місці, коли ви їх не використовуєте.

3. Очищення насосного пристрою:

Підготуйте: ніжне мило або миючий засіб, чистий рушник для посуду.

Деталі для мийки: насосний пристрій.



ПРИМІТКА:

- Не занурюйте насосний пристрій під воду.
- Не промивайте насосний пристрій водою.
- Коли ви очищуєте дисплей насосного пристрою, використовуйте тільки вологі, м'які серветки з м'яким милом або миючим засобом. Більш сильні чистячі засоби або абразивні матеріали можуть зруйнувати дисплей

13. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Вхідна потужність: 110-240V 50-60Hz

Вихідна потужність: 5V 1A

Вага: 417 г

Розміри: 105x53 mm

Ємність акумулятора: 3.7V 1400 mAh Li-Ion

14. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На виріб поширюється 24-місячна гарантія.

З умовами гарантії можна ознайомитись за посиланням: <https://nenopl/gwarancja>

Деталі, контактні дані та адресу веб-сайту можна знайти за адресою:

<https://nenopl/kontakt>

Технічні характеристики та вміст комплекту можуть бути змінені без попередження.

Просимо вибачення за незручності.



Розміщений символ перекресленого сміттевого кошика повідомляє, що електричні або електронні пристрої, його аксесуари (наприклад: блоки живлення, дроти) або компоненти (наприклад, батареї, якщо додається) не можна викидати разом з господарськими відходами. Належні дії у разі необхідності утилізації обладнання або їх компонентів (наприклад, батареї) полягає в здачі обладнання до Punktu Zбору, де воно приймається безкоштовно. Утилізація регулюється поправленою версією Директиви WEEE (2012/19 / EU) та Директивою про батареї та акумулятори (2006/66 / EC). Правильна утилізація пристрою запобігає погіршенню природного середовища. Інформацію про пункти збору обладнання видається відповідними місцевими органами влади. Неправильна утилізація відходів загрожує штрафами, передбаченими чинним законодавством

Виробник:

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.

Ujastek 5b,

31-752 Краків,

Польща

Зроблено в Р.Р.С.



nenopl®

www.nenopl
inspired by Children,
designed by Parents

неноTM

bella

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый клиент,

приобретенный вами устройство **Neno Bella** - это электронный молокоотсос для сцеживания грудного молока после родов.

Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте молокоотсос во время беременности - это может привести к преждевременным родам.
2. Не используйте устройство, если вы страдаете хроническими заболеваниями или гиперчувствительностью, которая может вызвать боль при использовании молокоотсоса.
3. Перед каждым использованием устройства убедитесь, что ни один из его элементов не поврежден. Не используйте молокоотсос, если любая его часть заметно повреждена.
4. Держите устройство подальше от детей и домашних животных.
5. В целях гигиены применять молокоотсос должна только одна женщина.
6. Держите насосную часть устройства подальше от воды.
7. Не подвергайте устройство механическим повреждениям, таким как падение.
8. Держите силиконовые части молокоотсоса подальше от горячих поверхностей, чтобы избежать искажений.
9. Каждый раз, когда вы намерены хранить сцеженное молоко, сначала очистите и продезинфицируйте молокоотсос.
10. Не чистите детали прибора абразивными средствами.
11. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать молокоотсос - это приведет к потере гарантии.
12. Если использование устройства вызывает боль или сильный дискомфорт, выключите его и удалите молокоотсос от груди.
13. Не подключайте зарядное устройство к напряжения выше, чем указано в спецификации.

2. ЭЛЕМЕНТЫ

- A. Крышка
- B. Лейка
- C. Крышка мембраны
- D. Мембрана
- E. Муфта
- F. Клапан x2
- G. Бутылка для молока
- H. Подставка для бутылки
- I. Трубка
- J. Кабель для зарядки устройства
- K. Насосное устройство
- L. Соска для бутылки



3. ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ


Режим оттеживания:

L1 - 18,9 kPa; L2 - 21,5 kPa; L3 - 24,5 kPa; L4 - 30,7 kPa; L5 - 33,8 kPa; L6 - 36,9 kPa;
L7 - 38,9 kPa; L8 - 40,9 kPa; L9 - 42,9 kPa;

Режим стимуляции:

L1 - 3,9 kPa; L2 - 9,7 kPa; L3 - 12,8 kPa; L4 - 17,4 kPa; L5 - 20,5 kPa;
L6 Fast - 12,8 kPa; L6 Slow - 38,9 kPa;

4. ОПИСАНИЕ ЗНАЧКОВ И КНОПОК

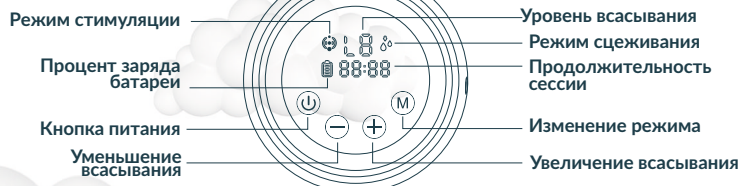

1. Кнопка питания: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.

2. Изменение режима: Для смены режимов нажмите кнопку. Устройство автоматически переключится из режима стимуляции в режим сцеживания через 2 минуты. Кроме того, молокоотсос сохраняет предварительные настройки и оснащен таймером. После включения устройства появятся последние использованные настройки. Устройство автоматически выключится через 30 минут использования.

3. Мощность всасывания:

Чтобы увеличить мощность всасывания, нажмите кнопку + на панели, чтобы уменьшить мощность всасывания, нажмите кнопку - на панели (режим стимуляции: L1-L6; Режим сцеживания: L1-L9)

4. Состояние батареи:

Указывает остаток заряда батареи. Зарядите молокоотсос, если батарея разряжена.

5. Продолжительность сессии:

Указывает время работы насоса. Устройство автоматически выключится через 30 минут.

5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



6. ОЧИСТКА

Мытье и дезинфекция - это две разные обязательные функции. Они должны быть сделаны отдельно, чтобы защитить Вашего ребенка и обеспечить правильную работу молокоотсоса.

Очистка - Очистка поверхности и избавление от пятен и грязи

Дезинфекция - уничтожение таких организмов, как бактерии и вирусы, которые могут

	Воронка	Компоненты молокоотсоса (муфта, мембрана, крышка мембраны)	Бутылочка и соска
Перед первым использованием	Мытье и дезинфекция	Мытье и дезинфекция	Мытье и дезинфекция
После каждого использования	Мытье	Мытье	Мытье
Раз на день	Дезинфекция	Дезинфекция	Дезинфекция

7. СБОР МОЛОКООТСОСА

1. Тщательно вымойте руки водой с мылом, прежде чем касаться молокоотсоса и груди.
2. Подключите мембрану и насосное устройство к муфте
3. Присоедините воронку к муфте.
4. Поместите клапан в муфту.
5. Прикрутите бутылку к муфте, повернув ее по часовой стрелке до упора.

Рекомендации:

- a. Перед каждым использованием проверяйте, не повреждены ли части молокоотсоса. В случае необходимости замените поврежденные элементы новыми
 - b. Всегда проверяйте чистоту частей устройства перед использованием.
- Чтобы избежать повреждения молокоотсоса убедитесь, что все его части сухие перед началом использования

8. ПОДЗАРЯДКА МОЛОКООТСОСА

Перед первым использованием необходимо зарядить молокоотсос до полной зарядки в течение 2х часов, подключив его к источнику питания с помощью USB кабеля. Значок аккумулятора на дисплее будет полным, когда зарядка завершится

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОКООТСОСА



1. Положите воронку на грудь, следя, чтобы сосок попал в внутрь дренажного канала.
2. Большим и указательным пальцами прижмите воронку и соединения молокоотсоса к груди. Поддерживайте грудь рукой.
3. Включите молокоотсос, нажимая кнопку питания и выберите режим работы, который вам подходит.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить молокоотсос после использования и установите крышку на лейку, чтобы защитить устройство от пыли.
 - a. Молокоотсос начинает работать в режиме стимуляции. Установите удобный для вас уровень всасывания с помощью кнопки +/-**Режим стимуляции** - быстрая накачка, имитирующая естественное высасывание молока из груди ребенком, стимулирующие поток молока.
 - b. Через 2 минуты молокоотсос автоматически переходит в режим глубокого отцеживания. Отрегулируйте уровень всасывания с помощью кнопок +/- найти самый высокий уровень всасывания, который вам удобен. Если молоко начинает вытекать из груди раньше, чем пройдет 2 минуты от начала, нажмите кнопку Изменить режим, чтобы переключиться на режим сцеживания молока.**Режим сцеживания** - медленная накачка, которая мягко и эффективно вытягивает молоко из груди.
 - c. При использовании режима сцеживания увеличивайте мощность всасывания до тех пор, пока не почувствуете легкий дискомфорт (не боль), и уменьшите силу всасывания на одну степень.

10. FAQ

1. **Устройство не запускается:** Убедитесь, что молокоотсос подключен к рабочей розетке. Если молокоотсос не имеет питания, его дисплей не включится и не появится сообщение об ошибке.
2. **Отсутствие / плохое всасывание:** Убедитесь, что все части молокоотсоса расположены правильно. Убедитесь, что все компоненты молокоотсоса расположены правильно. Разобрав молокоотсос на части, убедитесь, что все компоненты чистые и невредимые. Соберите молокоотсос снова, в соответствии с инструкциями, приведенной в разделе "сбор молокоотсоса".
3. **Из груди вытекло больше молока, чем может вместить бутылка:** выключите молокоотсос и отсоедините его от питания. Протрите молокоотсос влажной (не мокрой) тканью. Когда все компоненты устройства высохнут, сложите устройство

11. ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

1. Молокоотсос имеет встроенный аккумулятор. Чтобы сохранить аккумулятор от повреждения, устройство переходит в режим "хранение" после длительного периода бездействия. Чтобы выключить режим "хранение", подключите устройство в розетку и зарядите (2 ч).

2. Прежде чем убирать молокоотсос на длительное время, убедитесь, что:

- a. Все компоненты молокоотсоса чистые.
- b. Насосное устройство чистое.
- c. Аккумулятор полностью заряжен.

12. ОЧИСТКА КОМПОНЕНТОВ ЛАКТАТОРА

Приготовьте: мягкое мыло или моющую жидкость, чистое полотенце для посуды, питьевую воду. **Части, подлежащие мытью и дезинфекции:**

- воронка,
- бутылка,
- муфта,
- клапан,
- крышка мембраны,
- мембрана,
- крышка лейки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Вымойте отдельно все части, которые имели прямой контакт с молоком сразу после использования. Благодаря этому вы избежите образования осадка и размножения бактерий в устройстве.
- Для очистки прибора используйте только питьевую воду (водопроводную или бутылочную).
- Во время чистки клапанов не используйте мелкие инструменты, такие как щетки. Будьте осторожны, чтобы не пробить клапан насквозь.
- Разберите, промойте все детали прибора, которые непосредственно контактировали с молоком (кроме насосного устройства).

1. Очистка компонентов молокоотсоса (до первого использования и после использования):



Шаг 1 - промойте все части, отделенные друг от друга, (которые сталкивались с грудью и молоком) в холодной воде, чтобы смыть остатки молока и образовавшийся осадок.

Шаг 2 - Замочите в теплой мыльной воде в течение 5 минут, затем промойте.

Шаг 3 - Дайте элементам высохнуть естественным путем. Храните сухие части устройства в сухом прохладном месте, когда он не используется

2. Стерилизация компонентов молокоотсоса (до первого использования и после использования):




Шаг 1 - Заполните кастрюлю таким количеством воды, чтобы покрыть все части разложенного устройства. Доведите воду до кипения, прежде чем положить разобранный молокоотсос внутрь.

Шаг 2 - Поместите части устройства в кипящую воду на 10 минут.

Шаг 3 - Дайте компонентам устройства высохнуть естественным путем.

Хранить сухие детали в прохладном и сухом месте, когда вы их не используете.

3. Очистка насосного устройства:

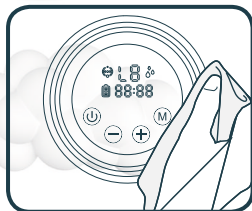

Подготовьте: нежное мыло или моющее средство, чистое полотенце для посуды.

Детали для мойки: насосное устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не погружайте насосное устройство под воду.
- Не промывайте насосное устройство водой.
- Когда вы очищаете дисплей насосного устройства, используйте только влажные, мягкие салфетки с мягким мылом или моющим средством. Более сильные чистящие средства или абразивные материалы могут разрушить дисплей

13. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Входная мощность: 110-240V 50-60Hz

Выходная мощность: 5V 1A

Вес: 733 г

Размеры: 105x53 mm

Емкость аккумулятора: 3.7V 1400 mAh Li-Ion

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На изделие распространяется 24-месячная гарантия.

С условиями гарантии можно ознакомиться по ссылке: <https://neno.pl/gwarancja>

Детали, контактные данные и адрес веб-сайта можно найти по адресу:
<https://neno.pl/kontakt>

Технические характеристики и содержимое комплекта могут быть изменены без предупреждения. Просим прощения за неудобства.



Символ перечеркнутого мусорного ведра указывает на то, что ненужные электрические или электронные устройства, его принадлежности (например, источники питания, провода) или компоненты (например, батареи, если они включены) не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Надлежащие действия в случае необходимости утилизации устройств или компонентов (например, батарей) или их утилизации-это возврат устройства в пункт сбора, где оно будет приниматься бесплатно. Утилизация подлежит изменению директивы WEEE (2012/19/EU) и директивы по аккумуляторам и аккумуляторам (2006/66 / ЕС). Правильная утилизация устройства предотвращает деградацию окружающей среды. Информацию о пунктах сбора оборудования выдают компетентные местные власти. Неправильная утилизация отходов грозит штрафами, предусмотренными законодательством, действующим на данной территории.

Производитель:

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
ul. Ujastek 5B
31-752 Краков,
Польша

Изготовлено в Р. Р. С.



neno[®]
www.neno.pl
inspired by Children,
designed by Parents





nenor™

*inspired by Children,
designed by Parents*