

nepo[®]

bueno

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Шановний Клієнт,
Придбаний вами Nepo Bueno - це електронний молоковідсмоктувач, який використовується для здиждування грудного молока після пологів.
Будь ласка, прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням пристрою.

ЗМІСТ:


1. Запобіжні заходи
2. Компоненти пристрою
3. Дисплей і значки
4. Початок роботи з пристроєм
5. Очищення та дезінфекція
6. Збір пристрою
7. Використання пристрою
8. Характеристика та функції пристрою
9. Годування дитини
10. FAQ
11. Довгострокове зберігання
12. Технічна специфікація
13. Гарантійний талон

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


1. Не використовуйте молоковідсмоктувач під час вагітності - це може призвести до передчасних пологів.
2. Не використовуйте пристрій, якщо ви страждаєте хронічними захворюваннями або гіперчутливістю, яка може викликати біль під час використання молоковідсмоктувача.
3. Завжди відключайте пристрій від мережі відразу після використання, якщо ваша мета - не заряджати вбудований акумулятор пристрою. Ніколи не залишайте пристрій, підключений до джерела живлення, без нагляду дорослих.
4. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.
5. Не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти або потрапити до ванни, кухонної раковини або умиwalkня.
6. Молоковідсмоктувач та аксесуари до нього не стійкі до високих температур. Тримайте їх подалі від гарячих поверхонь і вогню.
7. Несвідомо приємно користуватися пристроєм, якщо він пошкоджений чи пошкоджений шнур живлення або штепсель не працюють належним чином або якщо він впав на землю.
8. Не використовуйте пристрій, який потрапив під дію води або інших рідин. Не використовуйте пристрій під душем або під час купання. Не занурюйте пристрій під воду або інші рідини та не мийте пристрій під проточною водою.
9. Не використовуйте абразивні або їдкі речовини для очищення пристрою або його компонентів.
10. З міркувань гігієни застосовувати молоковідсмоктувач повинна лише одна людина.
11. Не намагайтеся самостійно ремонтувати молоковідсмоктувач - це призведе до втрати гарантії. У разі несправності зверніться в авторизований Сервісний центр.
12. Перед використанням переконайтеся, що жоден із компонентів набору не пошкоджений.
13. Не можна нагрівати грудне молоко в мікрохвильовці і не кип'ятити його. Підігріте молоко може обпекти дитину.
14. Перед першим використанням необхідно вимити і продезінфікувати всі елементи, які входять в комплект і які мають прямий контакт з грудьми або молоком.
15. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці. Будьте особливо обережні, якщо ви використовуєте пристрій поруч з дітьми.

2. ELEMENTS

- A. Кришка лійки
- B. Лійка
- C. Муфта
- D. Кришка мембрани
- E. Мембрана
- F. Клапан x2
- G. Пляшка молока
- H. Підставка для пляшки
- I. Комплект з соскою
- J. Зарядний кабель
- K. Насосний пристрій
- L. Трубка

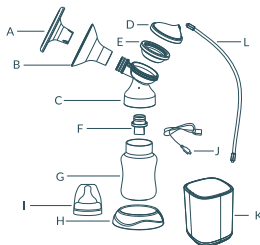

3. ДИСПЛЕЙ І ЗНАЧКИ

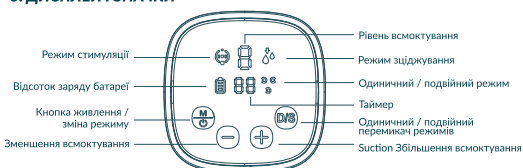

Кнопка живлення / зміни режиму: натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути молоковідсмоктувач. Натисніть кнопку і відпустіть одразу, щоб змінити режим.

Пристрій автоматично переключиться з режиму стимуляції в режим здиждування через 2 хвилини. Насосний пристрій оснащений таймером, який дозволить легко відстежувати тривалість сеансу здиждування. Пристрій автоматично вимкнеться через 30 хвилин використання. При увімкненні, пристрій автоматично почне використовувати рівні стимуляції і режими здиждування, які використовувалися під час попереднього використання молоковідсмоктувача.

Рівень всмоктування: збільшує потужність всмоктування, зменшує потужність всмоктування. Режим стимуляції має 5 рівнів потужності всмоктування (L1-L5). Режим здиждування має 9 рівнів потужності всмоктування (L1-L9).

Стан батареї: вказує стан заряду вбудованого в пристрій акумулятора. Якщо стан батареї низький, підключіть пристрій для підзарядки.

Час роботи пристрою: показує, скільки хвилин пристрій увімкнено. Молоковідсмоктувач автоматично вимкнеться по закінченні 30 хвилин використання.

Одиничний / подвійний режим: натисніть кнопку для перемикачання пристрою між режимами здиждування з однієї молочної залози і режимом здиждування обох молочних залоз одночасно. Якщо ви бажаєте здиждати молоко тільки з однієї молочної залози, необхідно підключити трубку і комплект аксесуарів до порту, вказаного на діаграмі.



4. ПОЧАТОК РОБОТИ З ПРИСТРОЄМ

- Якщо ви використовуєте молоковідсмоктувач вперше:
1. Підключіть пристрій для зарядки. Заряджайте акумулятор пристрою протягом 2 годин.
 2. Відсуніть від себе всі елементи набору, які знаходяться в безпосередньому контакті з грудьми або молоком.
 3. вийміть компоненти комплекту відповідно до інструкцій у розділі миття та дезінфекція



5. МИТТЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Миття та дезінфекція - це дві різні обов'язкові функції. Вони повинні бути зроблені окремо, щоб захистити Вашу дитину і забезпечити правильну роботу молоковідсмоктувача.

Очищення - очищення поверхні і позбавлення від пилу і бруду.
Дезінфекція - знищення таких організмів, як бактерії та віруси, які можуть бути присутніми на поверхні пристрою

Як діяти ?	Лійка і кришка лійки	Муфта, мембрана, кришка мембрани, клапан	Пляшечка і соска
Перед першим використанням	Миття і дезінфекція	Миття і дезінфекція	Миття і дезінфекція
Після кожного використання	Миття	Миття	Миття
Раз на день	Дезінфекція	Дезінфекція	Дезінфекція

Насосний пристрій, зарядний кабель, штекер не можна мити або дезінфікувати в воді. Не використовуйте шпильки та інші предмети, які можуть пошкодити, пошкодити частини молоковідсмоктувача. Відсуніть всі частини молоковідсмоктувача одне від одного відразу після використання. Це допомагає запобігти розмноженню бактерій і формуванню осадку.

Під час чистки та дезінфекції молоковідсмоктувача використовуйте лише воду, безпечну для пиття.

Миття в раковині

1. Відсуніть всі частини молоковідсмоктувача один від одного, які мають прямий контакт з грудьми або з молоком.
2. Промийте вищезгадані елементи під проточною водою, щоб видалити залишки молока.
3. Замочте частини молоковідсмоктувача в теплій мильній воді на 5 хвилин, потім промийте.
4. Дозвольте всім частинам молоковідсмоктувача висохнути природним шляхом.
5. Зберігайте компоненти комплекту в сухому місці, коли ви не використовуєте пристрій.

Дезінфекція кип'яченою водою

1. Заповніть каструлю водою і помістіть її на плиту. Води повинно бути достатньо, щоб всі компоненти молоковідсмоктувача повністю покривалися.
2. Доведіть воду до кипіння.
3. Помістіть компоненти молоковідсмоктувача на 10 хвилин в киплячу воду.
4. Дозвольте всім частинам молоковідсмоктувача висохнути природним шляхом.
5. Зберігайте компоненти комплекту в сухому місці, коли ви не використовуєте пристрій.

Очищення насосного пристрою

Насосний пристрій слід регулярно протирати вологою тканиною, щоб запобігти потрапленню пилу на пристрій. Не занурюйте прилад під воду і не мийте його проточною водою. Не мийте прилад абразивними або хімічними речовинами.

6. ЗБІР ПРИСТРОЮ


Перед кожним використанням переконайтеся, що всі компоненти комплекту чисті, сухі і нешкоджені.




1. Помістіть мембрану і її кришку на з'єднання



2. Помістіть ліжку на з'єднання.

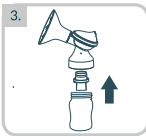


3. Вставте клапан в з'єднання. Прикрутіть пляшку для молока для з'єднання, обертаючи його за годинниковою стрілкою до відчутного опору

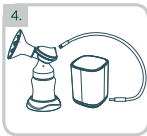

4. Підключіть трубку до кришки мембрани і в відповідний порт на насосному пристрої.

5. Якщо ви хочете зцілити молоко з обох грудей одночасно, повторіть кроки 1-4 для другого набору елементів, які входять до набору

7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

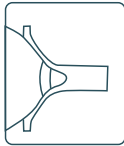

1. Покладіть ліжку на груди і слідкувати, щоб сосок потрапив в середину дренажного каналу.



2. Великим і вказівним пальцями притисніть ліжку та з'єднання молоковідсмоктувача до грудей. Підтримуйте груди рукою.



3. Увімкніть молоковідсмоктувач, натискаючи кнопку живлення, і виберіть режим роботи, який вам підходить.



4. Натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути молоковідсмоктувач після використання та встановити кришку на ліжку, щоб захистити пристрій від пилу

Молоковідсмоктувач починає працювати в режимі стимуляції. У цьому режимі пристрій імітує природне смоктання дитини, щоб стимулювати потік молока. Встановіть зручний для вас рівень всмоктування за допомогою кнопки +/- Рекомендується збільшувати потужність всмоктування до тих пір, поки не відчуте легкий дискомфорт (не біль), далі необхідно зменшити силу всмоктування на одну ступінь. Через 2 хвилини молоковідсмоктувач автоматично переходить у режим відціджування. Відрегулюйте рівень всмоктування за допомогою кнопок +/-, щоб знайти найвищий рівень всмоктування, який вам зручний. Якщо молоко починає витікати з грудей раніше, ніж пройде 2 хвилини, натисніть кнопку живлення / зміни режиму, щоб вручну переключити пристрій в режим відціджування.

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ

1. Пристрій smart

- 5 рівнів стимуляції
- 9 рівнів відціджування
- 2-фазна технологія накачування: Стимуляція / відціджування молока
- 4-фазна функціональність smart: Стимуляція / відціджування / автоматична зміна режиму / пам'ять налаштування.

2. Гігієнічний дизайн для запобігання зворотного потоку їжі

Закрыта система зливу молока запобігає надходженню їжі назад, зберігаючи їжу своєю і дбати про здоров'я молодої матері

3. Ліжка з м'якого силікону

Еластичний, м'який силікон, з якого виготовлена ліжка зменшує тиск на груди і спрощує потік молока.

4. Тихий і легкий

Безшумна робота насосного пристрою дозволяє використовувати пристрій скрізь. Легкий портативний молоковідсмоктувач розроблений з думкою про працюючих мам, які повинні відціджувати грудне молоко протягом дня.

5. Сенсорний екран

Зручний у використанні, сенсорний дисплей пристрою показує час роботи пристрою. Вся необхідна інформація легко читається. Крім того, пристрій запам'ятовує нещодавно використані налаштування режиму стимуляції і режиму всмоктування їжі.

6. Акумулятор заряджається через USB

Міцний літій-іонний акумулятор, який підтримує до 2 годин роботи пристрою. Пристрій заряджається через порт USB-C.

7. Молоковідсмоктувач не містить Бісфенол-А

Молоковідсмоктувач і його аксесуари виготовлені з матеріалів, що не містять Бісфенол-А. Молоковідсмоктувач сумісний з більшістю доступних дитячих пляшечок.

9. ГОДУВАННЯ ДИТИНИ

Не розморожуйте і не розгрівайте молоко в мікрохвильовці або за допомогою окропу. Це може обпекти рот малюка. Розморожене молоко можна зберігати в холодильнику. Не заморожуйте розморожене молоко повторно. Ви можете швидко розморозити молоко, тримаючи пляшку / мішок під теплою проточною водою. Помістіть закриту пляшку або мішок у миску з теплою водою на 20 хвилин, щоб довести молоко до температури тіла

Годування:

Завжди перевіряйте пляшку, соску та інші компоненти до і після кожного використання. Якщо соска пошкоджена або розірвана, негайно припиніть використовувати. Перевірте міцність соски, потягнувши її за круглий кінець, переконайтеся, що матеріал не відірветься і не задусить вашої дитини. Не збільшуйте отвір соски. Малюк повинен перебувати під наглядом дорослої людини під час годування. Не використовуйте пляшечки для заспокоєння дитини.

10. FAQ

1. Насосний пристрій не запускається

Переконайтеся, що пристрій підключено до робочої розетки живлення. Якщо батарея розряджена і пристрій не підключений до джерела живлення, дисплей пристрою не запускається

2. Слабке всмоктування або його відсутність

Переконайтеся, що всі деталі пристрою щільно прилягають. Розберіть пристрій, перевірте, чи все в порядку чи деталі чисті та нешкоджені, потім зберіть їх знову.

3. З грудей витекло більше молока, ніж може вмістити пляшка:

Вимкніть молоковідсмоктувач і відціджайте його від живлення. Протріть молоковідсмоктувач вологою (не мокрою) тканиною. Коли всі компоненти пристрою висохнуть, складіть пристрій знову

11. ДОВГОСТРОКОВЕ ЗБЕРІГАННЯ

Пристрій оснащений батареєю і автоматично переходить в режим зберігання, коли воно не використовується протягом тривалого часу. Щоб відключити режим зберігання пристрою, підключіть його до електромережі не менше ніж на 2 години і повністю зарядіть акумулятор. Перед тим, як прибрати прилад, ретельно вимийте всі його компоненти і переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений.

12. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Вхідна потужність: 10-240V 50-60Hz

Вихідна потужність: 5V 2A

Ємність акумулятора: Литово-іонова 3.7V, 2000mAh

Вага: 780 г

Розміри: 72x72x95mm

Режим відціджування	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
Потужність всмоктування (kPa):	18.9	21.5	24.5	30.7	33.8	36.9	38.9	40.9	42.9
Режим стимуляції	L1	L2	L3	L4	L5				
Потужність всмоктування (kPa):	3.9	9.7	12.8	17.4	20.5				

13. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На виріб поширюється 24-місячна гарантія.

З умовами гарантії можна ознайомитись за посиланням: <https://neno.pl/gwarancja>

Деталі, контактні дані та адресу веб-сайту можна знайти за адресою: <https://neno.pl/kontakt>

Технічні характеристики та вміст комплекту можуть бути змінені без попередження. Просимо вибачення за незручності.



Розміщений символ перекресленого сміттевого кошика повідомляє, що електричні або електронні пристрої, його аксесуари (наприклад: блоки живлення, дроти) або компоненти (наприклад, батареї, якщо додається) не можна викидати разом з господарськими відходами. Належний дії у разі необхідності утилізації обладнання або їх компонентів (наприклад, батарей) полягає в здачі обладнання до Punktu Zбору, де воно приймається безкоштовно. Утилізація регулюється поправленою версією Директиви WEEE (2012/19 / EU) та Директивою про батареї та акумулятори (2006/66 / EC). Правильна утилізація пристрою запобігає погіршенню природного середовища. Інформація про пункти збору обладнання видється відповідними місцевими органами влади. Неправильна утилізація відходів загрожує штрафами, передбаченими чинним законодавством

Виробник:

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b,
91-752 Краків,
Польща

Виготовлено в Кумай



neno[®]
www.neno.pl
inspired by Children,
designed by Parents

neno[®]


bueno

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




2. ЭЛЕМЕНТЫ

- A) Крышка лейки
- B) Лейка
- C) Муфта
- D) Крышка к мембране
- E) Мембрана
- F) Клапан x2
- G) Бутылка молока
- H) Подставка для бутылки
- I) Комплект с соской
- J) Зарядный кабель
- K) Насосное устройство
- L) Трубка

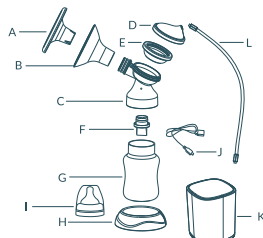

3. ДИСПЛЕЙ И ЗНАЧКИ

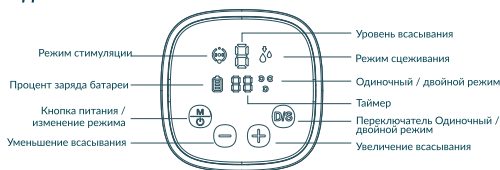

Кнопка питания / изменения режима: нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить молокоотсос. Нажмите кнопку и отпустите сразу, чтобы изменить режим.

Устройство автоматически переходит из режима стимуляции в режим сцеживания через 2 минуты. Насосный прибор оснащен таймером, который позволяет легко отслеживать продолжительность сеанса сцеживания. Устройство автоматически выключится после 30 минут использования. При включении устройство автоматически начнет использовать уровни стимуляции и режимы сцеживания, которые были использованы во время предыдущего потребления молокоотсоса

Уровень всасывания: увеличивает мощность всасывания, уменьшает мощность всасывания. Режим стимуляции имеет 5 уровней мощности всасывания (L1-L5). Режим сцеживания имеет 9 уровней мощности всасывания (L1-L9)

Состояние батареи: показывает состояние заряда встроенного в устройство аккумулятора. Если состояние батареи низкое, подключите устройство для подзарядки.

Время работы устройства: показывает, сколько минут устройство включено. Молокоотсос автоматически выключится по 30 минутам использования.

Уважаемый Клиент,

Приобретенный вами Neno Bueno - это электронный молокоотсос, который используется для сцеживания грудного молока после родов. Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Меры предосторожности
2. Компоненты устройства
3. Дисплей и значки
4. Начало работы с устройством
5. Очистка и дезинфекция
6. Сбор устройства
7. Использование устройства
8. Характеристика и функции устройства
9. Кормление ребенка
10. FAQ
11. Долгосрочное хранение
12. Техническая спецификация
13. Гарантийный талон

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Не используйте молокоотсос во время беременности - это может привести к преждевременным родам.
2. Не используйте устройство, если вы страдаете хроническими заболеваниями или гиперчувствительностью, которая может вызывать боль во время использования молокоотсоса.
3. Всегда отключайте прибор от сети сразу после использования, если ваша цель - не заряжать встроенный аккумулятор устройства. Никогда не оставляйте устройство, подключенное к источнику питания, без присмотра взрослых.
4. Не используйте устройство обильно легковоспламеняющихся материалов.
5. Не храните устройство в местах, где оно может упасть или попасть в ванну, кухонную раковину или унитаз.
6. Молокоотсос и аксессуары к нему не устойчивы к высоким температурам. Держите их подальше от горячих поверхностей и огня.
7. Немедленно прекратите пользоваться прибором, если он имеет какие-либо повреждения, шнур питания или штепсель не работают должным образом или если он прибор упал.
8. Не используйте устройство, которое попало под действие воды или других жидкостей. Не используйте устройство под душем или во время купания. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости, не мойте устройство под проточной водой.
9. Не используйте абразивные или едкие вещества для очистки устройства или его компонентов.
10. Из соображений гигиены применять молокоотсос должен только один человек.
11. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать молокоотсос - это приведет к потере гарантии. В случае неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.
12. Перед использованием убедитесь, что ни один из компонентов набора не поврежден.
13. Нельзя нагревать или кипятить грудное молоко в микроволновке. Подогретое молоко может обжечь ребенка.
14. Перед первым использованием необходимо вымыть и продезинфицировать все элементы, которые входят в комплект и имеют прямой контакт с грудью или молоком.
15. Храните устройство в недоступном для детей месте. Будьте особенно осторожны, если вы используете устройство рядом с детьми.

Одноразовый / двойной режим: нажмите кнопку для переключения устройства между режимами сцеживания с одной молочной железой и режимом сцеживания с обеих молочных желез одновременно. Если вы желаете сцеживать молоко только с одной груди, необходимо подключить трубку и комплект аксессуаров к порту, указанному на диаграмме.



4. НАЧАЛО РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

- Если вы используете молокоотсос в первый раз:
1. Подключите устройство для зарядки. Зарядите аккумулятор устройства в течение 2 часов.
 2. Отключите от себя все элементы набора, которые находятся в непосредственном контакте с грудью или молоком.
 3. Вымойте компоненты комплекта в соответствии с инструкциями в разделе Мытье и дезинфекция.



5. МЫТЬЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Мытье и дезинфекция - это две разные обязательные функции. Они должны быть сделаны отдельно, чтобы защитить ребенка и обеспечить правильную работу молокоотсоса.

Очистка - Очистка поверхности и избавление от пятен и грязи
Дезинфекция - уничтожение таких организмов, как бактерии и вирусы, которые могут присутствовать на поверхности устройства

Как действовать ?	Лейка и крышка лейки	Муфта, мембрана, крышка мембраны, клапан	Бутылочка и соска
Перед первым использованием	Мытье и дезинфекция	Мытье и дезинфекция	Мытье и дезинфекция
После каждого использования	Мытье	Мытье	Мытье
Раз на день	Дезинфекция	Дезинфекция	Дезинфекция

Насосное устройство, зарядный кабель, штекер не можно мыть и дезинфицировать в воде. Не используйте щетки и другие предметы, которые могут пробить, повредить части молокоотсоса. Отсоедините все части молокоотсоса друг от друга сразу после использования. Это помогает предотвратить размножение бактерий и формирование осадка. Во время чистки и дезинфекции молокоотсоса используйте только воду, безопасную для питья.

Мытье в раковине

1. Отсоедините все части молокоотсоса друг от друга, которые имеют прямой контакт с грудью или с молоком.
2. Промойте вышеупомянутые элементы под проточной водой, чтобы удалить остатки молока.
3. Замочите части молокоотсоса в теплой мыльной воде на 5 минут, затем промойте.
4. Позвольте всем частям молокоотсоса высохнуть естественным путем.
5. Храните компоненты комплекта в сухом месте, когда вы не используете устройство.

Дезинфекция кипящей водой

1. Заполните кастрюлю водой и поместите ее на плиту. Воды должно быть достаточно, чтобы все компоненты молокоотсоса полностью покрывались.
2. Доведите воду до кипения.
3. Поместите компоненты молокоотсоса на 10 минут в кипящую воду.
4. Позвольте всем частям молокоотсоса высохнуть естественным путем.
5. Храните компоненты комплекта в сухом месте, когда вы не используете устройство.

Очистка насосного устройства

Насосное устройство следует регулярно протирать влажной тканью, чтобы предотвратить попадание пыли на устройство. Не погружайте прибор под воду и не мойте его проточной водой. Не мойте прибор абразивными и химическими веществами.

6. СБОР УСТРОЙСТВА

Перед каждым использованием убедитесь, что все компоненты комплекта чистые, сухие и не поврежденные.




1. Поместите мембрану и ее крышку на соединение (муфту)



2. Поместите лейку на муфту.




3. Вставляйте клапан в муфту. Покройте бутылку для молока для соединения, вращая его по часовой стрелке к ощущаемому сопротивлению

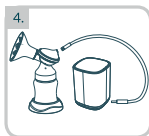

4. Подключите трубку к крышке мембраны и в соответствующий порт на насосном устройстве.

5. Если вы хотите сцедить молоко с обеих молочных желез одновременно, повторите шаги 1-4 для второго набора элементов, которые входят в набор


7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

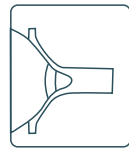


1. Положите воронку на грудь, следя, чтобы сосок попал в внутрь дренажного канала.



2. Большими и указательными пальцами прижмите воронку и соединения молокоотсоса к груди. Поддерживайте грудь рукой.

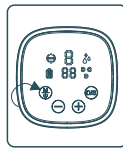

3. Включите молокоотсос, нажимая кнопку питания и выберите режим работы, который вам подходит.

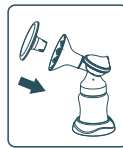

4. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить молокоотсос после использования и установите крышку на лейку, чтобы защитить устройство от пыли

Молокоотсос начинает работать в режиме стимуляции. В этом режиме устройство имитирует естественное сосание ребенка, чтобы стимулировать отток молока. Установите удобный для вас уровень всасывания с помощью кнопки +/- Рекомендуется увеличивать мощность всасывания до тех пор, пока не почувствуете легкий дискомфорт (не боль), далее уменьшите силу всасывания на одну ступень. Через 2 минуты молокоотсос автоматически переходит в режим отцеживания. Отрегулируйте уровень всасывания с помощью кнопок +/- чтобы найти самый высокий уровень всасывания, который вам удобен. Если молоко начинает вытекать из груди раньше, чем через 2 минуты от начала, нажмите кнопку включения / смены режима, чтобы переключить устройство в режим сцеживания.

8. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

1. Устройство smart

- 5 уровней стимуляции
- 9 уровней сцеживания
- 2-фазная технология нагнетания: стимуляция / сцеживание молока
- 4-фазная функциональность smart: стимуляция / сцеживание / автоматическое изменение режима / память настроек.

2. Гигиенический дизайн для предотвращения обратного потока пищи

Закрытая система слива молока предотвращает поступление пищи обратно, сохраняя пищу свежей и заботясь о здоровье молодой матери

3. Лейка из мягкого силикона

Эластичный, мягкий силикон, из которого изготовлена лейка, уменьшает давление на грудь и упрощает поток молока

4. Тонкий и легкий

Бесшумная работа насосного устройства позволяет использовать устройство везде. Легкий портативный молокоотсос, разработан с мыслью о работающих мамах, которые должны сцеживать грудное молоко в течение дня.

5. Сенсорный экран

Удобный в использовании, сенсорный дисплей устройства показывает время работы устройства. Вся необходимая информация легко читается. Кроме того, устройство запоминает недавно использованные настройки режима стимуляции и режима всасывания молока

6. Аккумулятор заряжается через USB

Прочный литий - ионный аккумулятор, который поддерживает до 2 часов работы устройства. Устройство заряжается через порт USB-C.

7. Молокоотсос не содержит Бисфенол-А:

Молокоотсос и аксессуары изготовлены из материалов, не содержащих Бисфенол-А. Молокоотсос совместим с большинством доступных детских бутылочек.

9. КОРМЛЕНИЕ РЕБЕНКА

Не размораживайте и не разогревайте молоко в микроволновке или с помощью кипятка. Это может обжечь рот малыша. Размороженное молоко можно хранить в холодильнике. Не замораживайте размороженное молоко повторно. Вы можете быстро разморозить молоко, держа бутылку / мешок под теплой проточной водой. Поместите закрытую бутылку или мешок в миску с теплой водой на 20 минут, чтобы довести молоко до температуры тела

Кормление:

Всегда проверяйте бутылку, соску и другие компоненты до и после каждого использования. Если соска повреждена или разорвана, немедленно прекратите использовать. Проверьте прочность соски, потянув ее за круглый конец, убедитесь, что материал не оторвется и не заденет вашего ребенка. Не увеличивайте отверстие соски. Малыш должен находиться под наблюдением взрослого человека во время кормления, не используйте бутылочки для вскармливания ребенка.

10. FAQ

1. Насосный устройство не запускается.

Убедитесь, что устройство подключено к рабочей розетке питания. Если батарея разряжена, дисплей устройства не загорится

2. Слабое всасывание или его отсутствие.

Убедитесь, что все детали устройства плотно прилегают. Разберите устройство, проверьте, все ли в порядке, детали чистые и невредимые, затем соберите их снова.

3. Из груди вытекло больше молока, чем может вместить бутылка: в выключите молокоотсос и отсоедините его от питания. Протрите молокоотсос влажной (не мокрой) тканью. Когда все компоненты устройства высохнут, снова сложите устройство.

11. ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

Устройство оснащено батареей и автоматически переходит в режим хранения, когда оно не используется в течение длительного времени. Чтобы отключить режим хранения устройства, подключите его к электросети, не менее чем на 2 часа, чтобы полностью зарядить аккумулятор. Перед тем, как убрать прибор, тщательно вымойте все его компоненты и убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

12. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Входная мощность: 10 - 240V 50-60Hz
Выходная мощность: 5V 2A
Емкость аккумулятора: Litova-jonowa 3.7 V, 2000mAh
Вес: 780 г
Размеры: 72x72x95mm

Режим сцеживания	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
Мощность всасывания (BPa):	38.9	21.5	24.5	30.7	33.8	36.9	38.9	40.9	42.9
Режим стимуляции	L1	L2	L3	L4	L5				
Мощность всасывания (BPa):	3.9	9.7	12.8	17.4	20.5				

13. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На изделие распространяется 24-месячная гарантия.

С условиями гарантии можно ознакомиться по ссылке: <https://neno.pl/gwarancja>

Детали, контактные данные и адрес веб-сайта можно найти по адресу: <https://neno.pl/kontakt>

Технические характеристики и содержимое комплекта могут быть изменены без предупреждения. Просим прощения за неудобства.



Символ перечеркнутого мусорного ведра указывает на то, что ненужные электрические или электронные устройства, его принадлежности (например, источники питания, провода) или компоненты (например, батареи, если они включены) не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Надлежащие действия в случае необходимости утилизации устройств или компонентов (например, батарей) или их утилизации-это возврат устройства в пункт сбора, где оно будет приниматься бесплатно. Утилизация подлежит изменению директивы WEEE (2012/19/EU) и директивы по аккумуляторам и аккумуляторам (2006/66 / EC). Правильная утилизация устройства предотвращает деградацию окружающей среды. Информацию о пунктах сбора оборудования выдают компетентные местные власти. Неправильная утилизация отходов грозит штрафами, предусмотренными законодательством, действующим на данной территории.

Производитель:

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujętek 5b,
31-752 Кракów,
Польша

Сделано в Китае



neno[®]
www.neno.pl
inspired by Children,
designed by Parents