

Посібник Користувача

Шановний Клієнт,
Придбаний вами пристрій NENO Leite - це збирач молока, який використовується для збору молока під час годування / зціджування молока з іншої молочної залози. Він призначений для збору їжі простим і ефективним способом.

01. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Перед кожним використанням перевірте стан виробу.
2. Для чистоща рекомендується використовувати тільки м'які щітки або губки. Тверді матеріали можуть призвести до подряпин.
3. Якщо є ознаки пошкодження, замініть виріб.
4. Не зберігайте гострі предмети поруч.
5. Цей продукт не іграшка. Колектор слід використовувати за призначенням.
6. Зберігайте продукт в сухому місці і уникайте прямих сонячних променів.

02. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБУ

Простий у використанні
Простим нанесенням на груди колектор прилипає і дозволяє збирати молоко.

Не містить Бісфенолу-А
Виготовлений з високоякісного силікону і поліпропілену.
Не містить Бісфенолу-А.

Безболісна, тиха праця
Колектор можна використовувати приховано. Без проблем його можна заховати в ліфчику або корсеті.

Позбутися від витоків
Під час годування однією груддю, молоко з іншої молочної залози випливає саме по собі. Це ідеальний пристрій, щоб уникнути забруднення білизни і в той же час не витратити дороге цінне молоко. Колектор збирає кожну краплю молока, що випливає з грудей.

Легко чистити
Для дезінфекції підготуйте посудину з киплячою водою і помістіть в нього розкладені елементи виробу. Дезінфекція повинна тривати близько 3-4 хв.

03. ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ КОЛЕКТОР?

1. Переконатися, що колектор був очищений як до, так і після використання.
2. Стисніть насос, щоб виштовпувати накопичене повітря назовні.
3. Зігніть комір і помістіть соски в центр лінійки.
4. Поверніть комір у вихідне положення, тоді насос міцно прилипає до грудей.
5. Ви можете використовувати продукт тільки в якості колектора. Тоді молоко буде вільно стікати в насос. Якщо ви хочете використовувати його як ручний молоковідсмоктувач-стисніть насос, щоб полегшити зцідження молока.



04. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Матеріал: силікон
Ємність: 100 мл

05. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На виріб поширюється 24-місячна гарантія.
З умовами гарантії можна ознайомитись за посиланням:
<https://nenop.pl/gwarancja>

Деталі, контактні дані та адресу веб-сайту можна знайти за адресою: <https://nen.pl/kontakt>

Технічні характеристики та вміст комплекту можуть бути змінені без попередження. Просимо вибачення за незручності

Виробник:
KGK Trade SP.
Уйастек 56,
31-752 Краків, Польща

виготовлено в Р.Р.С.